



## ePA-Exportmodul von sonoGDT

Mit dem Zusatzmodul **ePA-Export** unseres Partners sonoGDT können Sie Bilder in das von der elektronischen Patientenakte akzeptierte PDF/A-Dokument konvertieren und mit Schlagworten versehen. Ihr Arztsinformationssystem kann das PDF per GDT importieren und dann der ePA-Akte hinzufügen, alternativ stellen Sie es manuell direkt in die ePA ein.

1. Öffnen Sie den Patienten im GDTViewer, wählen Sie mit einem Klick die gewünschten Miniaturbilder, wählen Sie dann mit der rechten Maustaste, ePA-PDF/A-Export

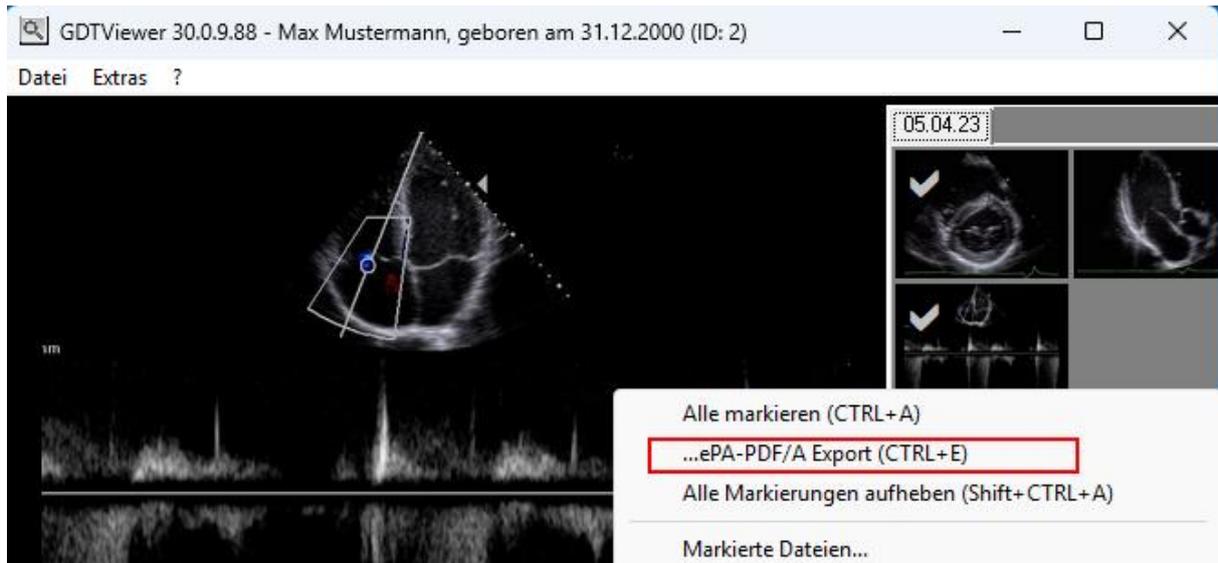

2. Fügen Sie ergänzende Kommentare und Schlagwörter hinzu, hier können Sie Standard-Vorgaben setzen.

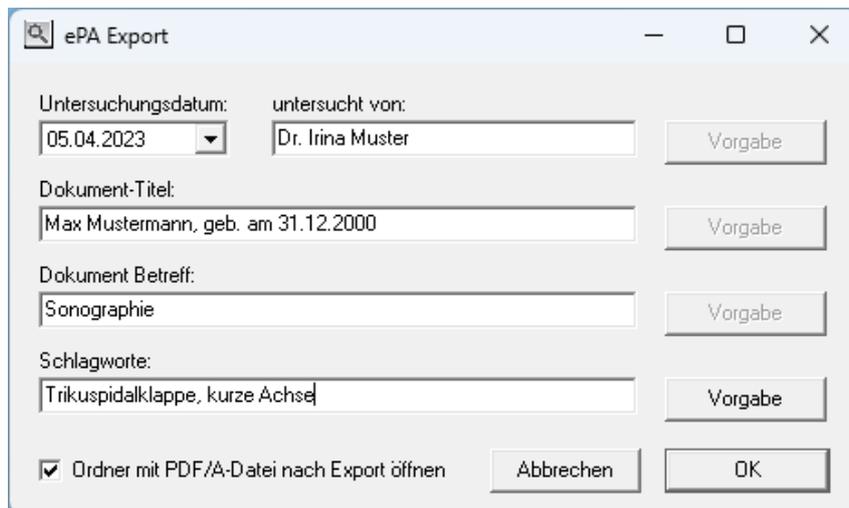The image shows the 'ePA Export' dialog box. It contains the following fields and controls:

- Untersuchungsdatum: 05.04.2023 (dropdown menu)
- untersucht von: Dr. Irina Muster (text field)
- Dokument-Titel: Max Mustermann, geb. am 31.12.2000 (text field)
- Dokument Betreff: Sonographie (text field)
- Schlagworte: Trikuspidalklappe, kurze Achse (text field)
- Checkboxes:  Ordner mit PDF/A-Datei nach Export öffnen
- Buttons: 'Vorgabe' (next to each field), 'Abbrechen', and 'OK'.


Ein Beispiel für das daraus resultierende PDF-File finden Sie auf der nächsten Seite.

Sie haben Interesse? Fordern Sie jetzt Ihr Angebot für das ePA-Upgrade bei uns an! Sie erreichen uns telefonisch unter 0351 8382349 oder per E-Mail an [service@aurosan.de](mailto:service@aurosan.de)

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.


Ihr Team von AUROSAN

Max Mustermann, geb. am 31.12.2000  
Untersuchung vom 05.04.2023

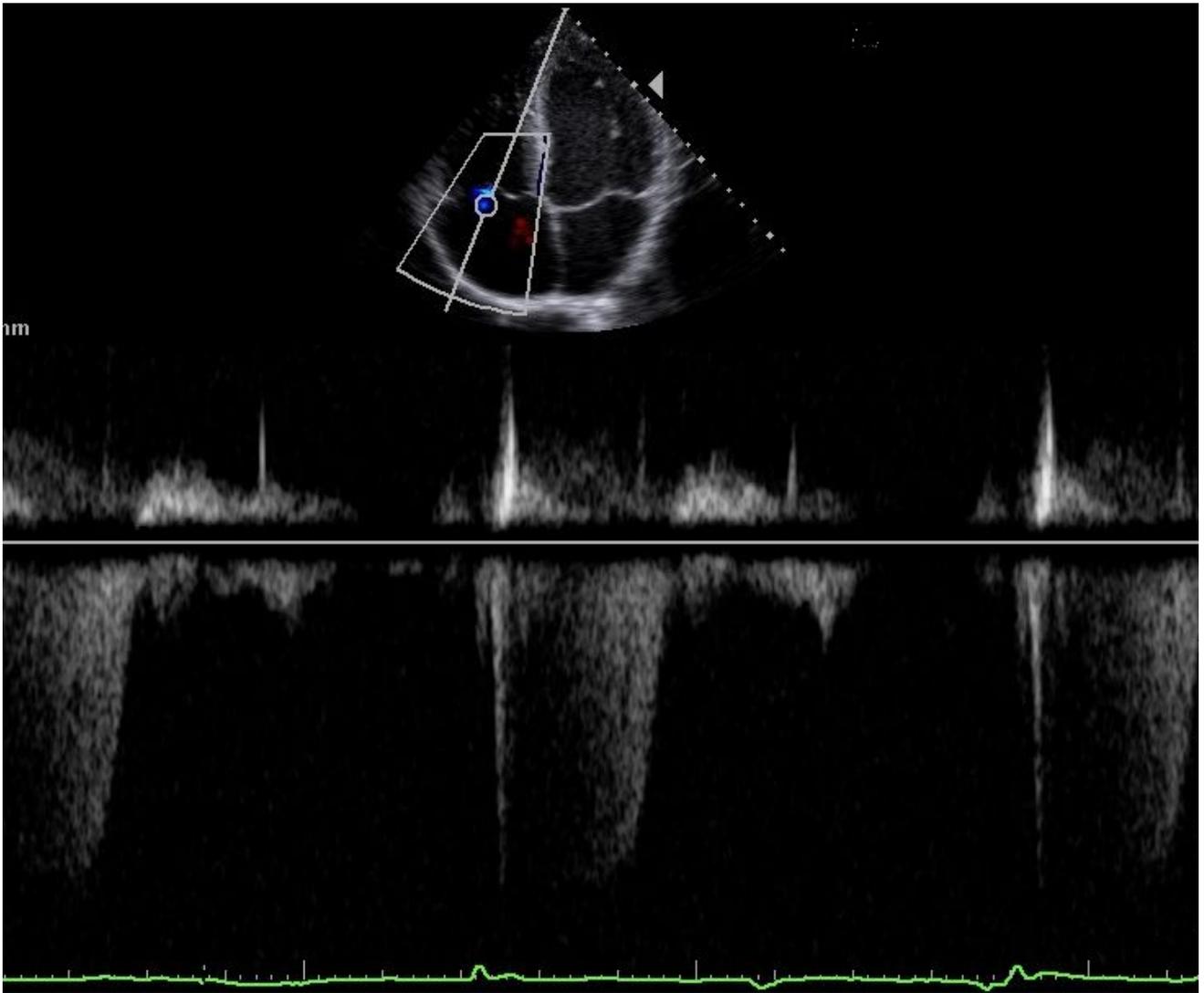

Echokardiographie  
kurze Achse, Tricuspidalklappe

Max Mustermann, geb. am 31.12.2000  
Untersuchung vom 05.04.2023

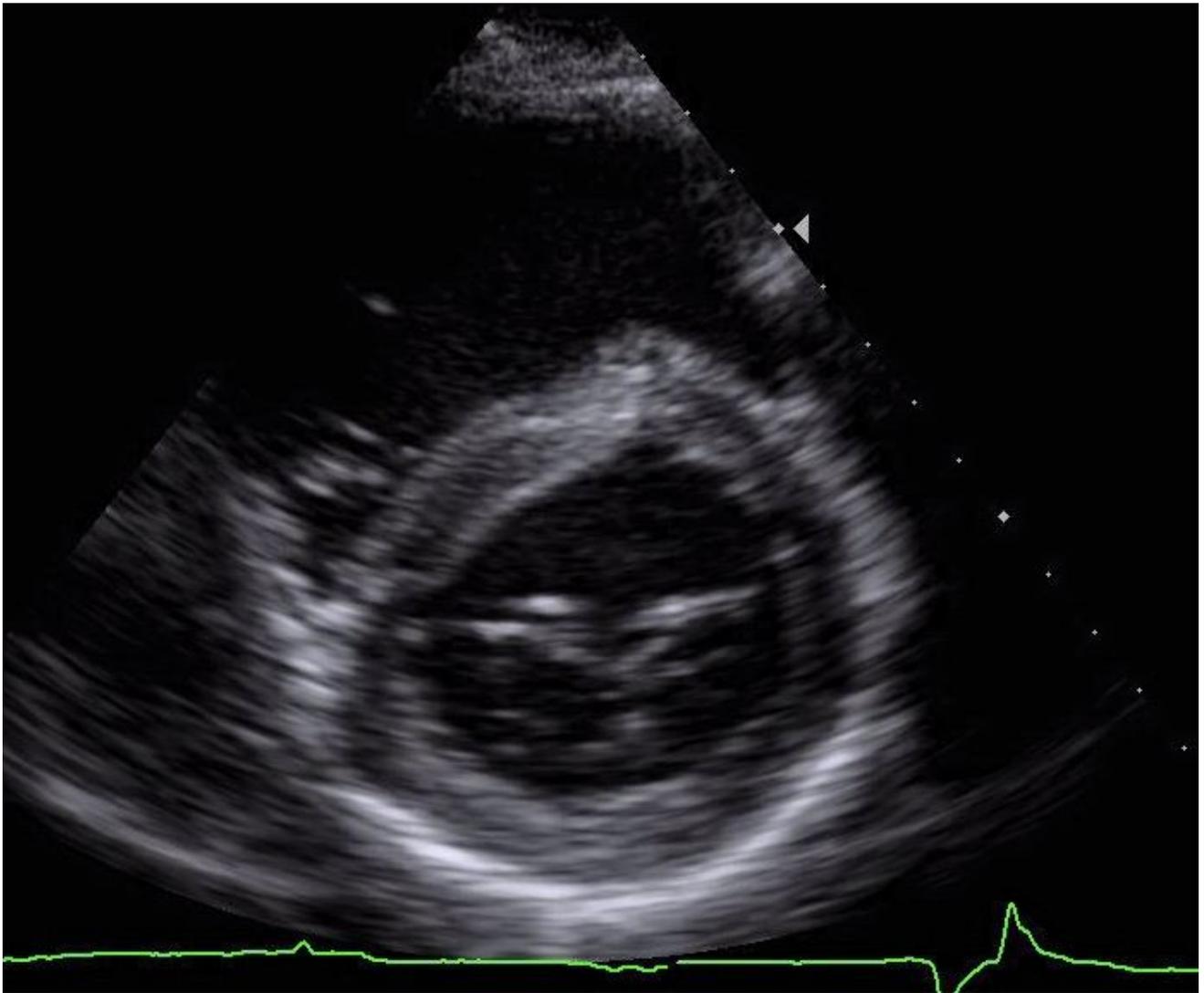

Echokardiographie  
kurze Achse, Tricuspidalklappe