



Bei der Auswahl von Waagen in der Arztpraxis ist zu beachten, dass ausschließlich geeichte und damit auch eichfähige Waagen benutzt werden dürfen. Für Hebammen, Apotheken und für die Eltern zu Hause reichen nicht geeichte Waagen aus.

Je nach Anwendung gibt es gesetzlich vorgeschriebene Anforderungen an die Waagen und auch im Betrieb eingehaltene gesetzliche Vorschriften, z.B. Eichfristen, Kennzeichnung der Waagen mit Eichmarken, sowie CE-Kennzeichen mit benannter Stelle.

Besonders zu beachten ist, dass es seit dem 19.04.2016 eine Anzeigepflicht nach § 32 MessEG gibt. Der Verwender muss neue Messgeräte innerhalb von 6 Wochen nach Inbetriebnahme bei der zuständigen Eichbehörde anzeigen.

Alle unsere eichfähigen Waagen sind Medizinprodukte, gehören der Eichklasse III an und sind bereits einmal geeicht.

Personenwaagen - eichfähig

MPE 250K100PM & MPE 250K100HM



Der Wägebereich der MPE professionellen Personenwaagen liegt zwischen 2 und 250 kg mit einer Ablesbarkeit von 0,1 kg. Auf der Rückseite der Anzeige befindet sich eine Zweitanzeige. Durch die robuste Ausführung, bequeme Transportierbarkeit durch zwei Rollen und leichte Reinigung ist diese Waage für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld anwendbar. Die höhenverstellbaren GummifüÙe erlauben ein sicheres und standfestes Aufstellen. Die Trittpläche ist groß und rutschfrei, Vibrationen werden automatisch ausgefiltert. Für genügend Zeit zum Ablesen wird bei Wägestillstand

die Gewichtsanzeige automatisch für 10sec „eingefroren“. Außerdem kann die Ablesbarkeit für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden. Durch die integrierte Mutter/Kind-Funktion kann auch das Gewicht von Kleinkindern leicht ermittelt werden.

Bei der Waage **MPE 250K100HM** ist im Stativ integriert ein ausziehbarer Größenmessstab im Messbereich 88 - 200 cm vorhanden.

MPD 250K100M



Diese professionelle Step-On-Personenwaage hat einen Wägebereich von 2 bis 250 kg mit einer Ablesbarkeit von 0,1 kg. Durch das einfache Antippen, Aufstellen und Ablesen ist sie enorm zeitsparend in der Anwendung.

Elektron. Säulenwaage seca 704

Die seca 704 Säulenwaage ist integrations- und systemfähig. Die Waage hat eine Tragkraft von bis zu 300kg, mit einer Ablesbarkeit von 0,05 kg (bis 150 kg) bzw. 0,1 kg (ab 150 kg). Sie ist sehr präzise, besonders robust und durch integrierte Rollen leicht transportierbar, wodurch sie für den täglichen Praxisbedarf professionell verwendbar ist. Für die Ermittlung von Gewicht, BMI und Körpergröße stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Integration eines mechanischen Messstabs oder Datenempfang eines optional integrierbaren Stadiometers. Weitere Vorteile sind die große und gleichzeitig flache Plattform, sowie die zeitsparenden Funktionen Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD und die Mutter/Kind-Funktion.



Die **seca 704** ist als Standardvariante oder als **seca 704 s** mit integriertem Messstab erhältlich. Der Messbereich liegt bei 60 - 200 cm.

Flachwaage seca 877

Die Waage seca 877 hat ein Gewicht von nur 4,2kg, ist sehr kompakt und dank Batteriebetrieb flexibel aufstellbar und für einen mobilen Einsatz ideal. Mit ihren vier großen NivellierfüÙen ist sie äußerst stabil und für Personen bis 200kg geeignet. Die Ablesbarkeit liegt bei 0,1 kg bzw. ab 150kg bei 0,2kg.



Artikel	Bestellnr.
MPE 250K100PM mit Stativ	747000500
MPE 250K100HM mit Stativ und Größenmessstab	747000100
MPD 250K100M	747000900

Artikel	Bestellnr.
Elektron. Säulenwaage seca 704	251000900
Elektron. Säulenwaage seca 704s mit Größenmessstab	251002600
Messstab seca 220 für Säulenwaage seca 704	251001000
Flachwaage seca 877	251002100



Waagen

Babywaagen (eichfähig)
Waagen (nicht eichfähig)
Zubehör

Babywaagen - eichfähig

Kern MBC15 & MBC20

Die Babywaagen MBC15 und MBC20 haben eine ergonomische Liegefläche, bestehen aus robustem ABS-Kunststoff und sind leicht zu reinigen. Durch die GummifüÙe ist ein sicheres und rutschfreies Aufstellen möglich. Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts ausgefiltert. Außerdem besitzen die Waagen eine automatische Data-Hold-Funktion. Das Gewicht des Babys kann vor dem Stillen gespeichert werden. Anschließend kann die Gewichtszunahme per Knopfdruck ermittelt werden.



Die Ablesbarkeit liegt beim **MBC15** bis 6 kg bei 0,002 kg, von 6-15 kg bei 0,005 kg und beim **MBC20** bei 0,010 kg im gesamten Messbereich.

Elektron. Säuglingswaage seca 336

Die elektronische Waage seca 336 kann bis zu 20 kg wiegen und hat eine Ablesbarkeit von 0,005 kg bzw. 0,01 kg (ab 10 kg). Sie ist handlich, leicht zu transportieren, hat eine flache Wiegemulde und ein gut ablesbares, beleuchtetes LCD-Display. Die hohe Qualität und komfortable Bedienung sorgen für ein schnelles und genaues Messergebnis. Diese batteriebetriebene Waage verbindet innovative Technik mit platzsparender Bauweise. Durch ihr geringes Eigengewicht und dem integrierten Tragegriff (auch zum Aufhängen nützlich) ist sie leicht zu transportieren und überall schnell und flexibel einsetzbar.



Optional kann die Waage mit einem digitalen (seca 234) oder analogen Messstab (seca 232 n) ausgestattet werden.

Babywaage seca 376

Diese integrationsfähige Säuglingswaage hat eine besonders große Wiegemulde, wodurch Kleinkinder auch im Sitzen gewogen werden können. Sie hat eine Tragkraft von bis zu 20 kg und dabei eine Ablesbarkeit von 0,005 kg bzw. von 0,01 kg (ab 7,5 kg). Durch die Funktechnologie seca 360° wireless ist die Waage ohne Kabel netzwerkfähig. Sie funktioniert sowohl mit Strom als auch Batterien. seca 376 besitzt eine einstellbare Dämpfung, TARA, HOLD, Auto-HOLD und BMIF (Breast-Milk-Intake-Funktion) für besonderen Komfort.



Sie ist erweiterbar zur Messstation dank optionalem Längenmessstab (seca 233).

Elektron. Säuglingswaage seca 757

Die integrationsfähige Säuglingswaage seca 757 ist netzwerkfähig durch Funktechnologie seca 360° wireless. Sie kann bis zu 15 kg wiegen und hat eine Teilung von 0,002 kg bzw. 0,005 kg (ab 5 kg).



Eine spezielle Dämpfung sorgt zusammen mit der HOLD-Funktion für schnelles, präzises Wiegen. Die ergonomisch geformte Mulde, mit hohen abgerundeten Seitenwänden, erleichtert das Wiegen auch von größeren Säuglingen. Durch die gute Hintergrundbeleuchtung sind die Ziffern der LCD-Anzeige auch in abgedunkelten Räumen gut lesbar. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über Netzanschluss oder Akku. Die seca 757 kann Messwerte drahtlos ins jeweilige EMR System übertragen und Patientendaten empfangen.

Artikel	Bestellnr.
Kern MBC15 Max. 6/15 kg	747000200
Kern MBC20 Max. 20 kg	747000300
Messstab für Kern MBC15/20	747000400
Elektronische Säuglingswaage seca 336	251000300
Tasche seca 428 für seca 336	251000800
Messstab seca 232n für seca 336	251000700
Babywaage seca 376	251001900
Messstab seca 233 für seca 376	251002000
Elektronische Säuglingswaage seca 757	251000600

Nicht eichfähige Waagen & Zubehör

Artikel	Bestellnr.
Personenwaage seca 760	251001600
Säuglingswaage seca 354	251001200
Rollmessband seca 206	251001100
Umfangmessband seca 201	274007800
Messstab seca 216 für Wandmontage	251001400
Messmatte seca 210 für Säuglinge und Kleinkinder	274000700